

**УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ПРОСТОГО И БЫСТРОГО
СБОРА МОЧИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ
И ЗАГРУЗКИ В АВТОМАТИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ ALIFAX**



Кат. номер SI 0903.900 *

* - На стадии регистрации в МЗ РФ

Пробирка PENOK - новое запатентованное устройство, предназначенное для упрощения процедуры сбора мочи, которое может быть использовано самим пациентом. Простым нажатием на стенки пробирки можно отобрать пробу. После удаления пипетки закрытая пробирка готова к отправке в лабораторию и последующей установке в анализаторы Alifax.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОБИРКУ PENOK



1. Сжать корпус пробирки PENOK и погрузить кончик пипетки в пробу. Аккуратно отпустить корпус.



2. Удалить пипетку легким нажатием на ее основание.



3. Закрыть пробирку PENOK белой крышкой.



Закрытая **пробирка PENOK** может быть загружена непосредственно в роторы анализаторов **Alfred 60** и **Sidecar** для полной автоматизации анализа до **60 проб** одновременно.



При необходимости **пробирку PENOK** можно использовать для биохимического экспресс-анализа мочи с помощью тест-полосок.

Преимущества

- Простота использования и транспортировки
- Экономичность
- Полная прослеживаемость по уникальному штрих-коду
- Загрузка в роторы Alfred 60 и Sidecar без необходимости снимать крышку
- Сокращение контаминации, ручных манипуляций и контакта с пробой
- Совместимость с тест-полосками
- Одна пробирка для нескольких исследований